




Tri Auto ZX

TUTTO IN UNO !!!

- **Contrangolo d'endodonzia**
- **Localizzatore d'apice**
- **Senza fili**

Tri Auto ZX

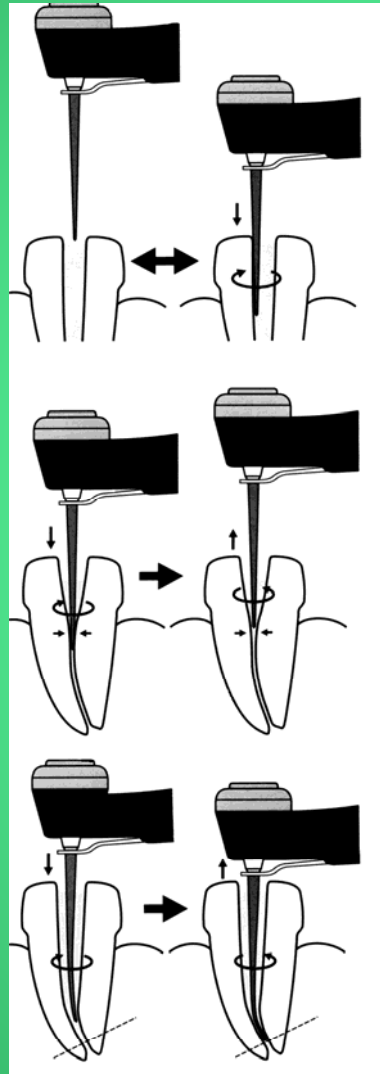

- Arresto/ avvio automatico (assente in modalità Manuale)

- Inversione in caso di coppia eccessiva (regolabile)

- Inversione all'apice (regolabile)

- **Un contr'angolo di 160 gr**
- **Velocità fino a 300 t/mn**
- **Testina rotante**
- **Controllo dell'avanzamento della lima con visualizzazione LED**
- **tre automatismi :**
 - **Arresto di avvio automatico**
 - **Inversione all'apice**
 - **Inversione in caso di Coppia eccessivo**
- **Compatibile con le lime NiTi rotanti**

Tri Auto ZX

Contrangolo 160 gr

Ricarica :1 h di
carica/autonomia


Elettrodo a Doppio
cordone

Elettrodo a lima (clip)

Elettrodo buccale
(uncino)

Tester

Lubrificante

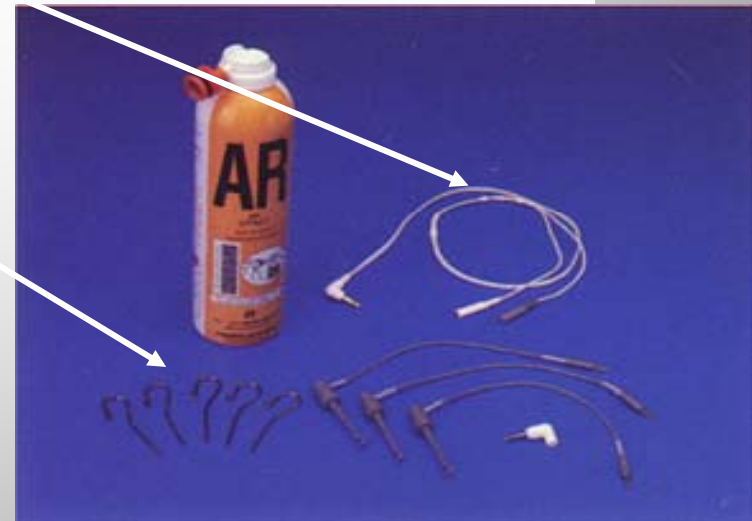



Contrangolo leggero ed
ergonomico

70g

Schermo di controllo Tri Auto Zx


Manual Mode: in questa modalità
La lima inizia a girare quando si accende
L'apparecchio

Lowe Mode/High Mode

8 possibili regolazioni
sia per la velocità che per il torque

EMR Mode: in questa modalità
Lo strumento misura manualmente
Il canale

Spie misurazione canale

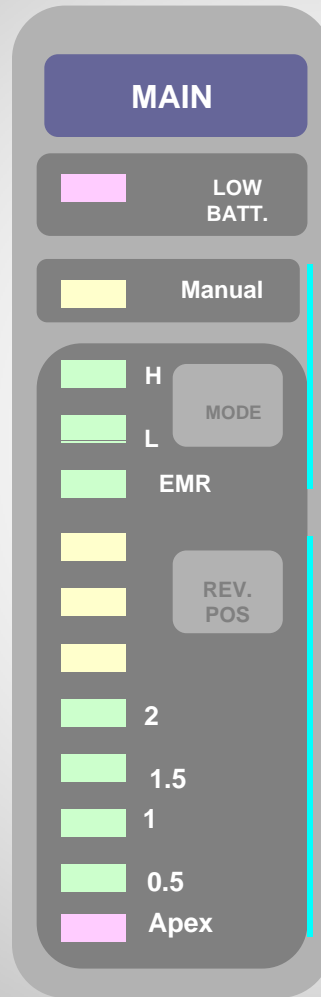

Marcia /arresto

Visualizzazione di batteria scarica


Scelta del Mode
EMR, Low, High, Manual

Scelta della posizione
in cui scatta ,inversione apicale
Apex - 2 mm

Funzionamento Tutto Automatico



1

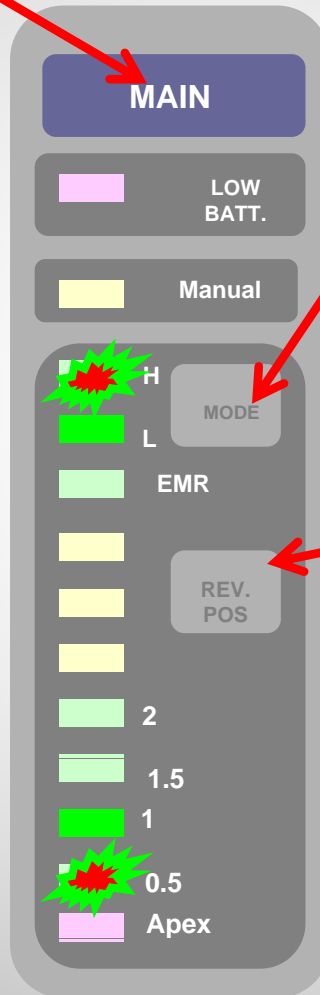

2

Mode **Low** o **High**

Misura e preparazione

Il mode H utilizza al meglio la velocità (max 300 t/mn)


3

Fissare la posizione dell'auto apical reverse a 0,5

Tri Auto ZX



1

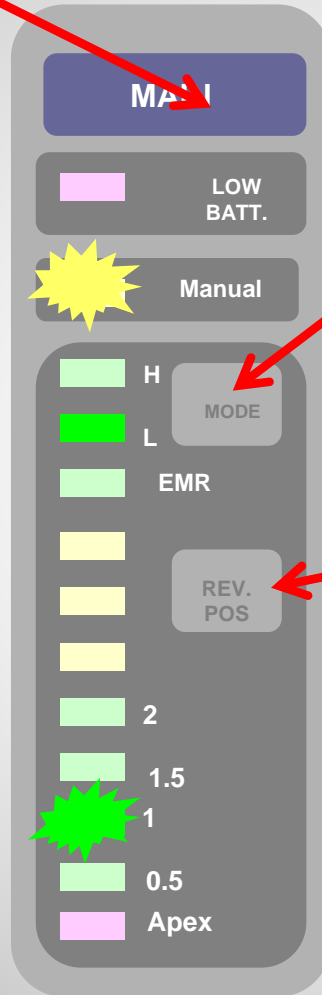

Mode Manuale
si avora senza misura
con precauzione

2

La rotazione del file può essere
invertito tenendo premuto
Rev.Pos.

3

Tri Auto ZX Regolazione AutoTorque Reverse


Low Mode/High Mode

8 possibili regolazioni
sia per la velocità che per il torque

Tenendo Premuto Mode,
selezione con Rev Pos la
posizione sulla scala:
Apex : maggior torque



Debole ↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
Forte

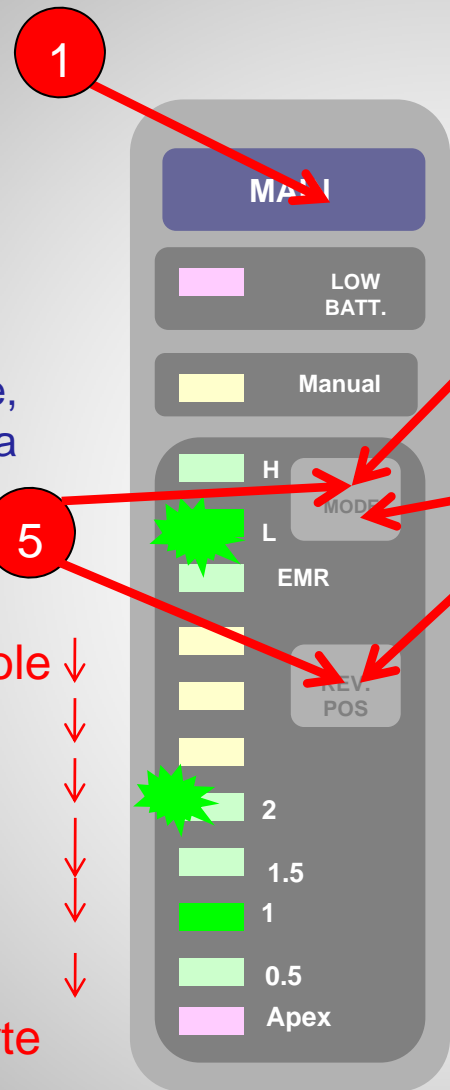

Scegliere o Low o High

Premendo Rev.Pos
selezionare la
posizione APEX

Premendo Mode 4 volte
Mode, ritornare alla prima
selezione (L o H)(un ciclo
completo)


Tri Auto ZX **Regolazione Sonoro**



3 possibili regolazioni per il sonoro

off ↓
soft ↓
loud ↓

1

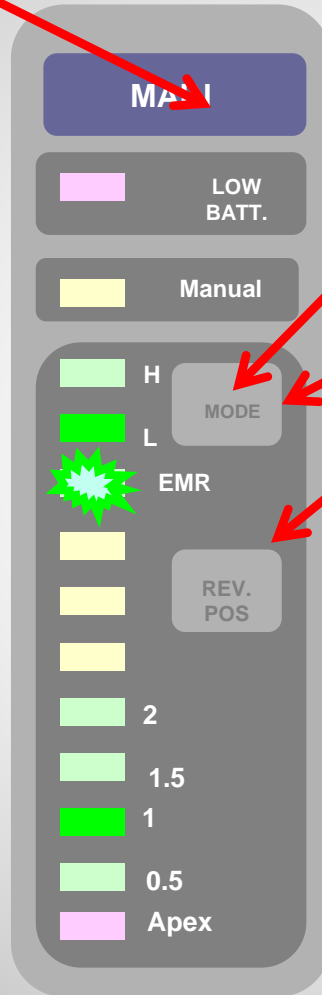



Scegliere EMR

2

3

Tenendo Premuto Mode, selezione con Rev Pos la posizione sulla scala:

Tri Auto ZX

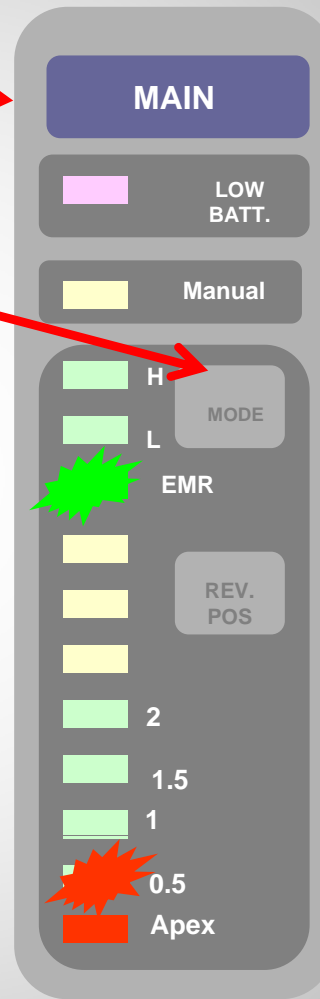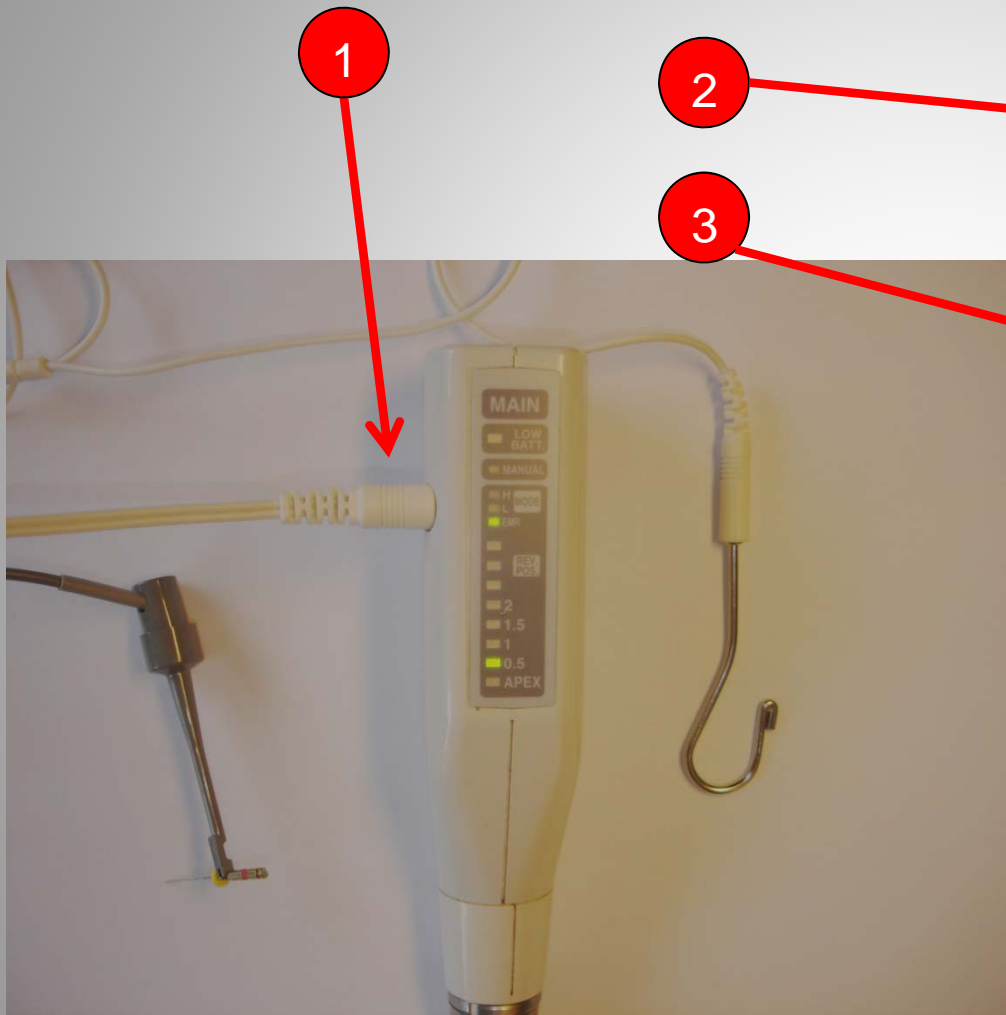

Mode EMR
misura canalare
manuale